

## Oxivir Plus

Pesevä desinfektioaine

### Kuvaus tuotteesta

**Oxivir Plus** on pesevä desinfektioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote soveltuu lääkinällisten välineiden ja laitteiden sekä vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfektioon. Lisäksi se soveltuu myös eritetahradesinfektioon.

### Ominaisuudet

- Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni
- Laaja mikrobisidinen teho

### Edut

- Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää.
- Puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa.
- Soveltuu laajasti erilaisten pintojen desinfioivaan puhdistukseen:
  - terveydenhuollon vaativissa kohteissa
  - kosteissa tiloissa
  - lämpimissä tiloissa
  - keittiötiloissa.
- Tavanomaisiin desinfectionaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi.
- Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini). Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus.
- Mikrokuitupyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa.
- Kestää likarastutusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa.
- Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja.
- Ehkäisee kalkkikiven muodostusta.
- Soveltuu tekstiilipintojen desinfioivaan puhdistukseen.
- Soveltuu käsi- ja konemenetelmiin.

### Käyttöohje


#### Pintadesinfektio

1. Valmista käyttöliuos oheisen taulukon mukaan.
2. Tee käyttöliuos viileään veteen. Mittaa ensin vesi ja lisää sen jälkeen **Oxivir Plus**.

#### Valmiin käyttöliuoksen määrä

Tiivisteen määrä	Pitoisuus	Valmista käyttöliuosta
1 litra	3,5 %	29 litraa
5 litraa	3,5 %	143 litraa

CE  
0088

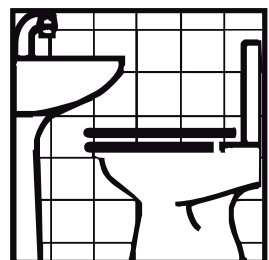

## Oxivir Plus

### Pesevä desinfektioaine

#### Käyttöohje jatkuu

Käyttötarkoitus	Pitoisuus	Laimennus	Käytössä huomioitavaa
Pintadesinfektio: Puhtaat pinnat	1 %	10 ml + 990 ml vettä	Pyyhi pinta huolellisesti käyttöliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä.
Pintadesinfektio: Likaiset pinnat	3,5 %	35 ml + 965 ml vettä	Märkäpyyhintä tai kosteapyyhintä. Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä.
Eritetahradesinfektio	3,5 %	35 ml + 965 ml vettä	Levitä liuos tahraan ja pyyhi tahra pois.
Tekstiilipintojen desinfioiva puhdistus	3,5 %	35 ml + 965 ml vettä	Poista irtolika tai erite. Annostele liuosta suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivouspyyhkeellä. Etene tahrn keskustaa kohden. Imeytä liennut tahra paperiin tai siivouspyyhkeeseen. Huuhteleva pinta lopuksi vedessä kostutetulla siivouspyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivouspyyhkeeseen.

#### Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas, kellertävä neste
Suhteellinen tiheys (20 °C)	1,0
pH-arvo, laimentamaton	0,5
pH-arvo käyttöliuos:	1,5 +/- 0,5

#### Koostumus:

Hapteen perustuva desinfiointiaine (peroksygeeni)	5 - 15 %
Ionittomia ja anionisia pinta-aktiivisia aineita, fosfonaattia, fosfaattia	< 5 %

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

#### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa. Vain ammattikäyttöön. Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä käyttöliuosten valmistuksessa. Turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot ks. käyttöturvallisuustiedote.

#### Varastointi:

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Suositeltavin säilytyslämpötila on + 6 - + 35 °C. Säilyvyys: Oxivir Plus -tiiviste 2 vuotta avaamattomana tai avattuna valmistuspäivästä lukien. Pakkauksessa mainittu viimeinen käyttöpäivä. Käyttöturvallisuustiedotteet ja EN-testitulokset toimitetaan pyydettyäessä.

#### Hyväksynät

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE Ila -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

#### Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

#### Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkausko	Pakkausmuoto
100826547	6 x 1 l	pullo
100827422	2 x 5 l	kannu

